

A Sutter BM-780 II és Curis® rf. készülékek javasolt beállításai és elektród típusok bőrgyógyászati alkalmazásokhoz*

Beavatkozás	Üzem mód	Jav. teljesítmény		Javasolt elektród típusok		A kezelés rövid leírása
		BM-780 II	Curis® (Watt, a BM-780 II esetén is)	Cikkszám		
Seprű- és pókvénák eltávolítása	Softsary (monopoláris koaguláció)	0,5-1	3-5 W	R360321 R360328 R360804		A kezelt területet fertőtlenítsük. Alkohol esetén hagyjuk elpárologni! Érzéstelenítéshez használjunk EMLA vagy LI-PRI krémet. Rögzítsük a semleges elektródát a kezelt területhez közel. Kezeléskor előbb nyomjuk a pedált és utána érintsük finoman az elektród hegyével az ér feletti bőrt. Lehetőség szerint ne szúrjuk át / meg a bőrt! Kezdjük a kisebb-vékonyabb erekkel és azok eredete előtt 2-3 mm-rel. Ha szükséges ismételjük (akár rögtön) a kezelést valamivel nagyobb teljesítménnyel. Ha közben szivárgó vérzés(ek) lépnek fel, gyorsan töröljük le és folytassuk a kezelést. 2 hét múlva ellenőrizzük a kezelést / gyógyulást. Közben ne távolítsa el a beteg a képződő varratokat, esetleg hegeket! A végleges eredmény 3-4 hét múlva alakul ki. A kezelés utáni néhány hétben a beteg ne menjen szaunába, gőzfürdőbe, úszni és védje a kezelt területet a direkt napfénytől!
				360510 360511 Az 1,6 mm-es csatlakozójú nyomógomb nélküli kézidarabbal!		
Teleangiectasiák eltávolítása	Softsary	0,5	3 W	R360321 R360328 R360804	Lásd előbb!	Mint előbb a seprű- és pókvénák eltávolításánál.
Pigment- vagy napfoltok (age spots) eltávolítása	Softsary	2,5-3	12-15 W	R360815		A kezelt területet fertőtlenítsük. Alkohol esetén hagyjuk elpárologni! Érzéstelenítésünk helyi érzéstelenítő injekcióval. Rögzítsük a semleges elektródát a kezelt területhez közel, pl. a karra. Kezeléskor előbb nyomjuk a pedált és utána helyezzük a hurkot finoman a bőrre. Seprő mozdulattal húzzuk át azt a kezelt területen és hántsuk le a bőrt rétegről-rétegre. Az esetlegesen kifehéredő (nekrotizáló) réteget óvatosan töröljük le.
Szemölcsök, fibrómák eltávolítása	Softsary (inkább a hurkoknál)	3-4	15-20 W	R360815 R360814 R360813		A kezelt területet fertőtlenítsük. Alkohol esetén hagyjuk elpárologni! Érzéstelenítésünk helyi érzéstelenítő injekcióval. Rögzítsük a neutrál-kábelt a kezelt területhez közel. Kezeléskor előbb nyomjuk a pedált / gombot és utána helyezzük a hurkot finoman a bőrre vagy kezdünk vágni. Hurok esetén hántsuk le a bőrt rétegről-rétegre. Az esetlegesen fehéredő (nekrotizálódó) réteget óvatosan töröljük le.
	vagy CUT2	2,5-4	12-20 W	R360812		

				R360321 R360328 és esetleg: R360450 R360440	Lásd előbb! 	
Syringoma = verejtékmirigy adenoma eltáv.	CUT1	1-1,5	5-8 W	R360450 R360440		A kezelt területet fertőtlenítsük. Alkohol esetén hagyjuk elpárologni! Érzéstelenítésünk helyi érzéstelenítő injekcióval. Rögzítsük a semleges elektródát a kezelt területhez közel. Kezeléskor előbb nyomjuk a pedált / gombot és utána kezdünk vágni.
(Kisebb) anyajegyek eltávolítása	CUT1 vagy CUT2	4	20 W	R360328 R360320	Lásd előbb! 	A kezelt területet fertőtlenítsük. Alkohol esetén hagyjuk elpárologni! Érzéstelenítésünk helyi érzéstelenítő injekcióval. Rögzítsük a semleges elektródát a kezelt területhez közel. Kezeléskor előbb nyomjuk a pedált / gombot és utána kezdünk vágni. Cut1 ahol a bőr (stratum corneum) vastagabb, Cut2 vékonyabb bőrön (pl. nemi szervek) vagy nyálkahártyán.
Haemangioma eltávolítása	CUT1 vagy CUT2	3-4	15-20 W	R360328 R360320	Lásd előbb!	Mint előbb a kisebb anyajegyek eltávolításánál.
Papularis melanocitás naevusok, fibrómák eltávolítása	CUT1	1-1,5	5-8 W	R360816		A kezelt területet fertőtlenítsük. Alkohol esetén hagyjuk elpárologni! Érzéstelenítésünk helyi érzéstelenítő injekcióval. Rögzítsük a semleges elektródát a kezelt területhez közel. Szikével, tangenciális excisióval távolítsuk el a naevus tömegét. A maradék részeket távolítsuk el finom seprő mozdulatokkal (vaporizálás, koaguláció) a 360816-os 1 mm-es gömbelektróddal. A végleges gyógyulás 6-8 hétig tart.
Condylomák eltávolítása	CUT2 és monopoláris CONTACT	4-5 5-6	20-25 W 25-30 W	R360812 R360450 R360817		A kezelt területet fertőtlenítsük. Alkohol esetén hagyjuk elpárologni! Érzéstelenítésünk helyi érzéstelenítő injekcióval. Rögzítsük a semleges elektródát a kezelt területhez közel. Kezeléskor előbb nyomjuk a pedált / gombot és utána kezdünk vágni. Ugyanígy járunk el a vérzéscsillapításra szánt 3 mm-es gömbelektróddal is.

Kontraindikációk: nagyobb teleangiectasiák, akut phlebitis, vízretenció a lábakon (ödéma), általánosan rossz egészségi állapot, terhesség, súlyos szív, máj és / vagy veseelégtelenség, pacemaker

*A fenti információk a gyártó és forgalmazó részéről általános javaslatoknak minősülnek, a felhasználók számára ezek betartása nem kötelező érvényű. A gyártó és forgalmazó nem vállalnak felelősséget az egyes beavatkozások eredményességéért és azok bármilyen közvetlen vagy közvetett következményeire.